

Technische richtlijnen voor weefselbiopten in de context van neurologische aandoeningen

Richtlijnen voor de chirurg:

Afmeting:

Spierbipt: lengte 2cm x breedte 0.5cm

Zenuwbipt: lengte 3cm

Kwalitatief bipt:

- Hanteer geen Duval tang
- Snijd volgens de richting van de vezel
- Bipt uit één stuk
- Vermijd het pletten of verschroeien van weefsel

Bewaring:

Het bipt dient droog en gekoeld bewaard te worden in een hermetisch gesloten container. Maak geen gebruik van fysiologische of glutaraldehyde oplossingen. Als koeling kan gebruik worden gemaakt van gewone ijsblokjes of een koelelement van 0°C. Gebruik geen droogijs. Uitdroging of bevriezing kan het weefselbipt beschadigen.



Richtlijnen voor verzending:

Aanvraagformulier:

Een bipt moet steeds worden vergezeld van een schriftelijk, volledig en correct ingevuld aanvraagformulier en klinisch verslag. Hierbij dienen de patiëntgegevens op het bipt overeen te komen met deze op de aanvraag.

Het aanvraagformulier kan u terugvinden op: www.bornbunge.org/diagnostics

Contact:

Het labo dient te worden ingelicht alvorens het bipt wordt verzonden. Om directe verwerking van het bipt te kunnen verzekeren, dient de zending te arriveren tussen 9:00 en 16:00 op ons labo.

Labo	03 265 91 48	labo.ibb@uantwerpen.be
Secretariat	03 265 25 96	labo.ibb@uantwerpen.be
IBB Neurobiobank	03 265 26 88	labo.ibb@uantwerpen.be

Adres:

Instituut Born-Bunge vzw – Universiteit Antwerpen
 Universiteitsplein 1 (parking 4)
 Gebouw T, verdieping 5, lokaal T5.65
 2610 Wilrijk
 België

Meer informatie kan u terugvinden op www.bornbunge.org