


STAP 8

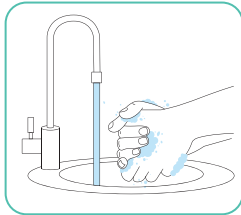


Was je handen.

STAP 9



- Steek het buisje in het doorschijnend veiligheidszakje.
- Laat het witte doekje zitten.
- Sluit het zakje. Verwijder de strip en kleef het zakje dicht.


STAP 10

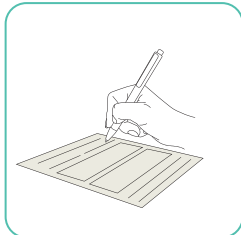

- Vul het deelnameformulier in:
 - met jouw gegevens
 - met de datum waarop je het staal nam
 - met de gegevens van je (huis)arts


Let op! Vul je het deelnameformulier niet juist in? Dan krijg je geen resultaat.

STAP 11

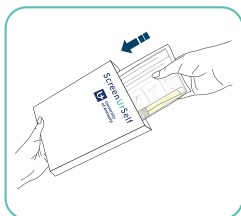


Steek het doorschijnend veiligheidszakje met je staal én het ingevulde deelnameformulier samen in het kartonnen doosje.

STAP 12

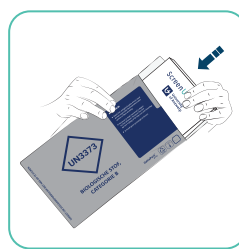

Steek het gevulde kartonnen doosje in de extra envelop. Op de envelop staat het adres van het labo. Je hoeft **geen** postzegel te kleven.

STAP 13

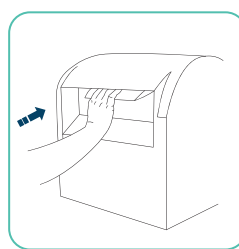

Stuur de envelop zo snel mogelijk op. Kan je je staal niet meteen opsturen? Bewaar het dan maximaal twee dagen op kamertemperatuur.



Colli-Pee® is ontwikkeld door Novosanis NV.



Novosanis NV
medical device company
Bijkhoevelaan 32c · B-2110 Wijnegem, België
welcome@novosanis.com
Dochteronderneming van Orasure Technologies, Inc.

Je kan deze info ook lezen in het Frans, Engels, Turks, Arabisch, Pools, Roemeens en Russisch op:

Vous pouvez également lire ces informations en français à l'adresse suivante:

You can also read the info in English on:

Bilgileri Türkçe olarak şu adresten de okuyabilirsiniz:

على الموقع الإلكتروني لـ "غلا بلا" عرقوتامر تاملولعمرلا هذه "قيد برع قمرجرت"
Z tymi informacjami możesz zapoznać się w języku polskim na stronie:

Puteți citi informațiile și în limba română la adresa:

Эта информация также доступна на русском языке на сайте:

www.ScreenUrSelf.be



ScreenUrSelf

**ZELF EEN STAAL NEMEN,
HOE DOE JE DAT?**



Volg deze gebruiksaanwijzing. Je kan ook een filmpje bekijken op www.ScreenUrSelf.be/hoe-moet-ik-een-staal-nemen-urine



Lees eerst dit:

- **Alleen jij** mag dit setje gebruiken. De code van de set is gelinkt aan jouw naam. Controleer of je naam op de brief juist is.
- Bewaar het setje altijd op **kamertemperatuur**. Voor en na gebruik.
- Gebruik het setje maar één keer.
- Heb je een staal genomen? Stuur het dan zo snel mogelijk op. **Ten laatste twee dagen na gebruik.** Verstuur je staal **niet** op een vrijdag of de dag voor een feestdag. Anders blijft het te lang in de postbus liggen.
- Stop twee dagen voordat je een staal neemt met **vaginale producten** (bv. zalf, crèmes). Wat mag je nog wel gebruiken?
 - vaginale anticonceptie
 - condooms
 - een glijmiddel op basis van water
- Was je vagina **niet grondig** voor je het staal neemt. Anders kan je niet voldoende afscheiding verzamelen.
- Neem je staal minstens **één uur** na de vorige keer dat je naar het toilet ging.



www.ScreenUrSelf.be

Wanneer mag je geen staal nemen?

- Neem geen staal als het **warmer is dan 25 graden**.
- Neem geen staal als het **vriest**.
- Neem geen staal tijdens je **maandstonden** of binnen de drie dagen daarna.
- Neem geen staal als je **zwanger** bent.
- Neem geen staal binnen de zes weken na een **bevalling**.
- Neem geen staal als de verpakking **beschadigd** is.
- Neem geen staal als de **vervaldatum** voorbij is. Die datum staat op de verpakking.

In de envelop vind je:

- een **brief**
- het **formulier om deel te nemen**: dat vind je op de achterkant van de brief
- een **folder** met extra info
- een **veiligheidszakje**: een doorschijnend zakje met daarin:
 - een rechthoekig wit doekje
- een extra **envelop** om je staal gratis terug te sturen
- een zakje met **materiaal om een staal te nemen: Colli-Pee**
- een **gebruiksaanwijzing** om het staal te nemen: die vind je hieronder


WAT IS DE COLLI-PEE?

Colli-Pee is een klein toestel dat het eerste deel van de urine opvangt. Dat deel van de urine bevat afscheiding van de vagina en baarmoeder(hals).

In dit deel van de urine kunnen we zien of je besmet bent met het virus dat kan zorgen voor kanker aan de baarmoederhals (humaan papillomavirus of HPV).

Hoe ziet de Colli-Pee eruit?

- De Colli-Pee zit in een doorschijnend zakje.
 - In dat zakje vind je:
 - **één Colli-Pee plastuit**
- Tekening I.: · A. plastuit
· B. vlotter

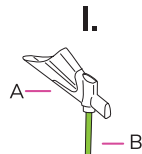


· één buisje gevuld met bewaarmiddel

Tekening II.: · C. dop

- D. buisje
 - E. bewaarmiddel
- Het bewaarmiddel moet in het buisje blijven.
Drink het bewaarmiddel niet!


II.

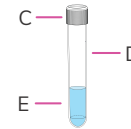

HOE NEEM JE EEN STAAL? STAP VOOR STAP.

Tip! Lees de gebruiksaanwijzing eerst helemaal voor je start.



STAP 1

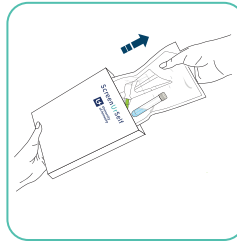

- Neem het doorschijnend zakje met de Colli-Pee uit het kartonnen doosje.
- Bewaar het kartonnen doosje. Die heb je nodig om je staal op te sturen.


Let op! Neem je staal minstens één uur na de vorige keer dat je naar het toilet ging.

STAP 2

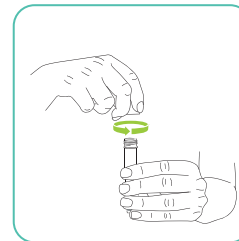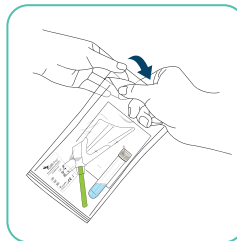


- Neem de plastuit en het buisje uit de verpakking.
- Draai de dop van het buisje los.

STAP 3

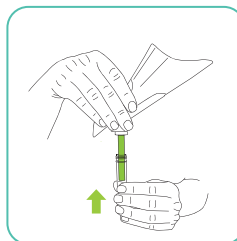


Maak het buisje vast aan de plastuit.

STAP 4

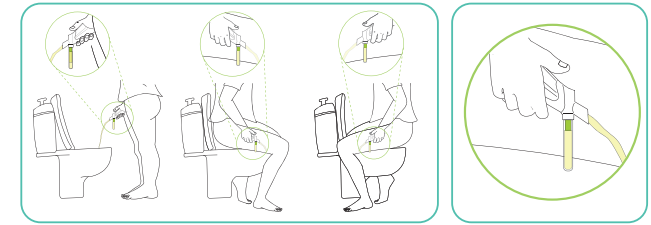


- Ga op het toilet zitten. Of ga voor het toilet staan.
- Plas in de plastuit. Het toestel vangt de juiste hoeveelheid urine op. Je hoeft **niet** te stoppen met plassen als het buisje vol is. Urine die niet meer in het buisje past, loopt langs de andere kant van de plastuit in het toilet.

STAP 5

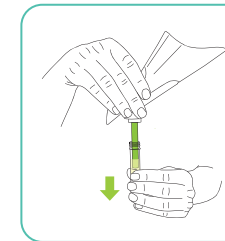


Maak het buisje los van de plastuit.

STAP 6

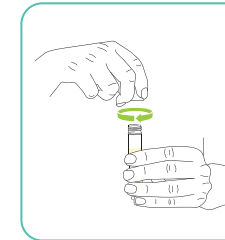

Sluit het buisje goed af. Je moet de dop goed vastdraaien.

STAP 7

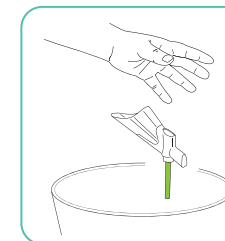

Gooi de plastuit bij het pmd-afval.