

Ne zaman numune almamalıyız?

- Hava 25 dereceden daha sıcak ise numune almayın.
- Hava sıcaklığı sıfırın altında ise numune almayın.
- Regl döneminde veya sonraki üç gün içinde numune almayın.
- Hamile iseniz numune almayın.
- Bir doğumdan sonraki altı hafta içinde numune almayın.
- Ambalaj hasarlı ise numune almayın.
- Son kullanma tarihi geçtikten sonra numune almayın. Bu tarih ambalajın üzerindedir.

Zarfın içinde şunları bulacaksınız:

- bir mektup
- katılmak için form: bunu mektubun arkasında bulacaksınız
- ekstra bilgi içeren bir broşür
- bir kilitli poşet: yarı şeffaf bir poşet ve içinde:
 - dikkörtgen beyaz bir bez
- başka bir zarf, numunenizi ücretsiz olarak geri göndermek için
- bir poşet ve numune almak için materyal içerir: Evalyn Brush
- bir kullanma kılavuzu, numuneyi almak için: aşağıda bulacaksınız

EVALYN BRUSH NEDİR?

Evalyn Brush, vajina, uterus ve rahim ağzı salgılarını toplayan küçük bir cihazdır. Materyali almak için fırçayı kullanacağız. Bu materyalde, rahim ağzı kanserine neden olabilen virüs (insan papilloma virüsü veya HPV) ile enfekte olup olmadığımızı görebiliyoruz.

Evalyn Brush neye benziyor?


Paketin içinde bir fırça (Evalyn Brush) bulacaksınız.

- Fırça, kanatçıklara sahip şeffaf bir kılıftan oluşur.
- Bir tarafta, pembe bir kapak kılıfın üzerine oturtulmuştur.
- Diğer tarafta pembe bir çevirme düğmesi vardır.
- Pembe kapağın altında beyaz bir fırça vardır.




NASIL NUMUNE ALACAKSINIZ? ADIM ADIM.

İpucu! Başlamadan önce kullanma kılavuzunu tamamen okuyun.

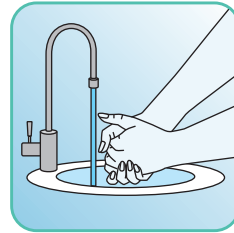


ADIM 1

Öncelikle ellerinizi su ve sabunla yıkayın.

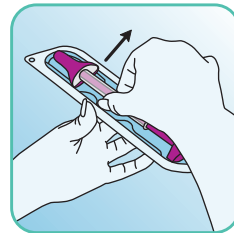

ADIM 2

- Kiti ambalajından çıkarın.
- Ambalajı saklayın. Numunenizi gönderirken buna ihtiyacınız olacaktır.

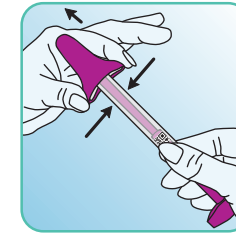

ADIM 3


- Pembe kapağın kenarlarına baş ve işaret parmağınızla bastırın ve kapağı çıkarın. Fırçayı dışarıya doğru bastırmayın.
- Pembe kapak bir kenarda dursun. Numunenizi göndermek için gereklidir.

Dikkat! Beyaz fırçaya ellerinizle dokunmayın. Aksi takdirde, testin sonucu değişebilir.




ADIM 4

Rahat bir pozisyonda ayakta durun veya tualete oturun. Örneğin, tampon yerleştirir gibi.

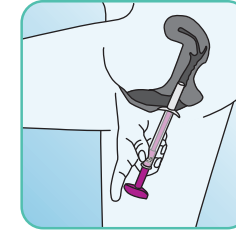


ADIM 5

- Bir elinizle labia dudaklarını ayırın.
- Diğer elinizle kılıfın en üst kısmını, kanatçıklar labiaya bastırana kadar vajinanın içine yerleştirin.

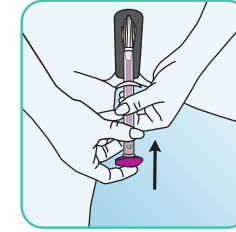

ADIM 6

- Bir elinizle alttaki şeffaf kılıfı sıkıca tutun.
- Pembe çevirme düğmesine basın. Şeffaf kılıfa dayanıncaya ve daha ileri gidemez hale gelinceye kadar itin. Böylece fırça kılıftan dışarı çıkar. Doğru oturduğunda bir tık sesi duyarsınız veya hissedersiniz.

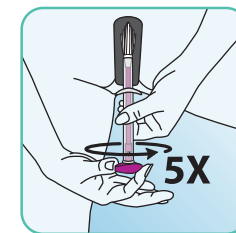

ADIM 7

- Pembe çevirme düğmesini aynı yönde beş kez döndürün. Her dönüşte bir klik sesi duyar veya hissedersiniz. Fırça dönecektir.
- Beş kez döndürdükten sonra kılıfı vajinanızdan çıkarın.